



COVID-19

Notice d'utilisation accompagnant la mise sur le marché de Masques « GRAND PUBLIC FILTRATION SUPÉRIEURE À 90% » exclusivement réservés à des usages non sanitaires, suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 mise à jour le 28 Janvier 2021.

Domaine d'utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesse de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.

Performances : Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

MASQUE GRAND PUBLIC FILTRATION SUPÉRIEURE À 90%

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L./m².s-1 pour une dépression de 100 Pa

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-2074/DGA MNRBC/2000305/NP - 02/04/2020) et qui supporte 50 lavages (rapport RP/20 -3236/DGA MNRBC/2000305/NP - 01/05/2020)

Conception selon le guide AFNOR SPEC S76-001-2020. Masque testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.



Matières principales fabriquées en France ou Euromed Cycle du produit vertueux

Composition :

- Tissu extérieur : 100 % Coton lavé
- Maille bouclette intérieure : 100% Polyester
- Élastiques* : 20% Polyamide - 20% Élasthanne - 60% Polypropylène

* la composition des élastiques peut varier



ISO
9001

BCS Certification
Score

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Le temps de port du masque est limité à 4 heures.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.



15 chemin du plateau 69570 DARDILLY

